

Scope défibrillateur HEARTSTART FR2+ de Philips

Mode DSA :

- Appuyer sur le bouton ON/OFF
- Brancher les électrodes (prise en haut à gauche)
- Pour choquer, appuyer sur bouton choc (3) sous l'écran

Débrayage Manuel

- **Appuyer simultanément sur les 2 boutons option** (boutons bleus à droite de l'appareil)
- **Appuyer sur le bouton option du haut** (Libellé : Manuel)
- **Appuyer à nouveau sur le bouton du haut** (Libellé : Charge manuelle)

Quand l'appareil est chargé : il émet un signal sonore continu et le bouton choc clignote.

- **Appuyer sur le bouton de choc**

Pour décharger l'appareil sans choquer, appuyer sur le bouton du haut : désarmement manuel

Pour repasser en mode DSA : Eteindre l'appareil (bouton ON/OFF), puis le remettre en marche en appuyant **2 fois** sur le bouton ON/OFF

Mode surveillance (scope)

Brancher le câble 3 brins à la place des électrodes de défibrillation, l'appareil s'utilise alors comme un scope.

Changement de la batterie

La batterie se trouve en haut à droite

- Déconnecter les électrodes du défibrillateur
- Pour la sortir : tirer sur le loquet jaune
- Pour l'insérer, la faire glisser dans son logement jusqu'à ce que le loquet s'enclenche

L'autotest s'effectue alors automatiquement

Si changement de batterie en urgence, on peut laisser les électrodes branchées, retirer la batterie, la changer, appuyer sur ON. Quand les électrodes sont branchées, l'autotest ne s'effectue pas et l'appareil redémarre en mode opérationnel quand on appuie sur ON.

Témoin de charge de la batterie en haut à droite :

- Sablier clignotant : batterie OK
- Croix rouge : batterie à plat